


STRIDE


VOLT

用户手册

型号参考: VT-10

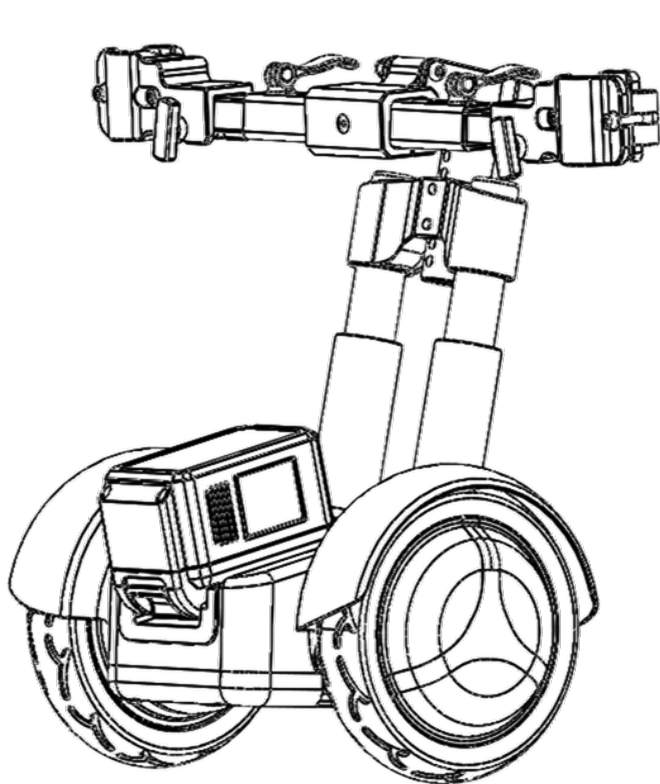

型号: VT-10.1
可折叠手动轮椅

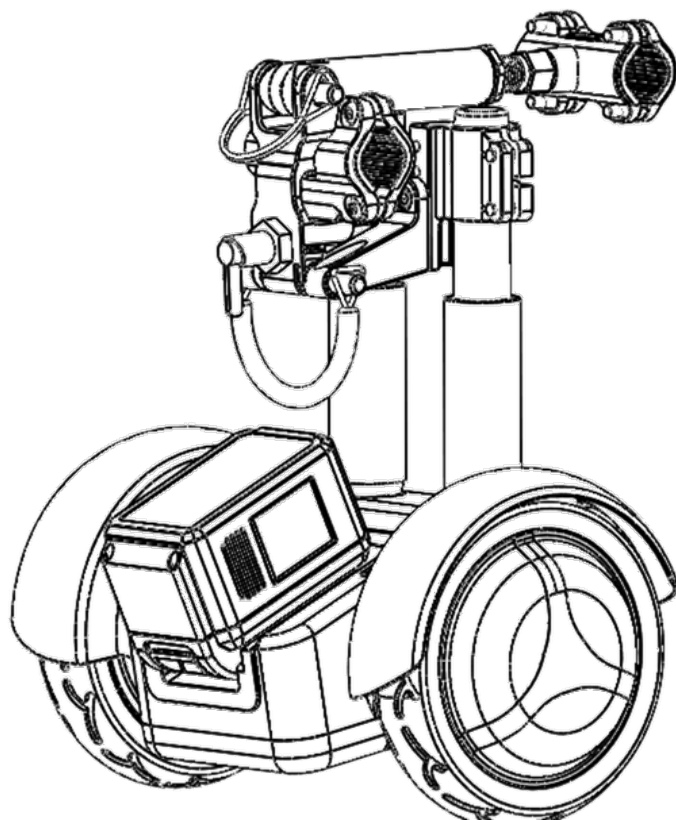

型号: VT-10.2
刚性手动轮椅

我们衷心感谢您选择我公司的产品。

在使用本产品前，请仔细阅读本“用户手册”，

以确保正确使用本产品。

请务必阅读此信息，了解电磁干扰可能对电动轮毂造成的影响。

来自无线电波源的电磁干扰 (EMI)

电动轮毂可能会受电磁干扰 (EMI)，电磁干扰是指从无线电台、电视台、业余无线电 (HAM) 发射机、双向无线电和手机等来源发出的干扰电磁能量 (EM)。干扰 (来自无线电波源) 会导致电动轮毂松开刹车、自行移动或向非预期的方向移动。它还会永久损坏电动轮毂的控制系统。干扰电磁能量的强度可以用伏特每米 (V/m) 来测量。每个电动轮毂可以抵抗一定强度的电磁干扰。这就叫它的“免疫水平”。免疫水平越高，保护作用越大。

在日常环境中有许多相对强的电磁场源。其中一些来源显而易见，很容易避免。其他的则不明显，干扰是不可避免的。但是，我们相信，遵循下面列出的警告，您的EMI风险将被降至最低。

辐射EMI的来源可以大致分为三种类型：

- 1) 带天线的手持式便携式收发器(发射器-接收器)。示例包括:民用波段(CB)无线电、“对讲机”、安全、消防和警察收发器、蜂窝电话、射频识别(RFID)和其他个人通信设备。
注:一些手机和类似设备在开机时会传输信号，即使在不使用时也是如此；
- 2) 中程移动收发器，如警车、消防车、救护车和出租车中使用的收发器。这些通常安装在车辆外部的天线上；
- 3) 远程发射机和收发机，如商业广播发射机(无线电和电视广播天线塔)和业余无线电。



注意：据我们所知，其他类型的手持设备，如无绳电话、笔记本电脑、AM/FM收音机、电视机、CD播放器和磁带播放器，以及小型电器，如电动剃须刀和吹风机，不太可能对您的电动轮椅造成电磁干扰问题。

目录

1. 介绍	4
1.1 产品简介及预期用途	4
1.2 重要安全注意事项 - 请仔细遵守	4
1.3 操作说明	4
1.4 允许的使用条件/操作地点	5
1.5 包装零件明细	6
2. 安装	7
2.1 安装Volt	7
2.1.1 折叠轮椅安装Volt	7
2.1.2 刚性轮椅安装Volt	10
2.2 安装摇杆控制器	14
2.2.1 折叠轮椅安装摇杆控制器	14
2.2.2 刚性轮椅安装控制器	15
3. 使用	16
3.1 摇杆控制器按键及功能	16
3.2 后控制器按键及功能	16
3.3 电池功能	17
3.4 充电	17
4. 安全说明及注意事项	18
4.1 安全说明	18
4.2 电池充电安全说明	19
5. 储存、清洁、循环使用和处理	20
5.1 储存	20
5.2 清洁	20
5.3 循环使用	20
5.4 处理	20
6. 技术参数	20
7. 维护及保修	21
7.1 维护	21
7.2 保修	21
保修卡	22
【标签、包装、标识设计】	23

1. 介绍

1.1 产品简介及预期用途

Volt是轮椅的附加驱动器，适用于各类手动轮椅，在原基础上加装成为电动轮椅。安装方式采用快拆式，安装方便轻巧，减少使用者出行时的体力负担。

1.2 重要安全注意事项 - 请仔细遵守

Volt是轮椅的附加驱动器。出于安全原因，只能由以下人员操作

- 通过阅读和理解本用户手册的全部内容，您已掌握了正确的处理和操作方法。
- 使用者在身体和精神上都有能力在所有可能的条件和情况下操作轮椅和装置。
- 设备未作任何技术改动。
- 用户必须花时间熟悉Volt的反应和性能，首先在没有危险的安全区域练习操作。强烈建议用户不要尝试在室外使用 Volt，直到可以在室内安全无障碍地操作为止。

购买后请详细阅读本操作手册。

如果出现技术故障，请联系专业经销商或代理商。

操作Volt时，请遵守轮椅制造商的规范（例如，最大坡度、轮胎气压等。），并严格遵守轮椅的操作说明。切勿超过任何规定的极限值。

! 因此，在阅读完本操作手册之前，不要开始使用Volt。

1.3 操作说明

除了经镁莱特批准使用的配件外，不要使用其他任何零件。同样，不得对Volt及其配件进行技术改造。Volt仅在以下条件下操作：

- 完全遵守本操作手册中包含的信息、说明和建议
- Volt只能由阅读完本手册人员操作
- 用户或任何第三方均未对Volt进行任何技术修改

严禁任何不了解本产品的人员使用Volt。

Volt不得用于任何违反设备预期用途的目的。这尤其适用于所有类型的货物运输，例如运输家用物品或额外人员。遵守本手册中关于安全检查的条例，以及使用时严格遵守道路交通安全规则。

镁莱特将Volt用于以下包括但不限于的操作均视为滥用：

- 使用违反本操作手册中的说明和建议的设备
- 超出本操作手册中规定的技术限制
- 对Volt的技术修改
- 使用未经镁莱特供应或批准的零件和配件

由以下原因造成的损坏

- 不正确地使用设备
- 由未完全了解本产品的人员使用
- 违反本操作手册中的说明和建议的使用
- 超出本操作手册中规定的技术限制

不被镁莱特视为公司责任的一部分。

! 使用Volt之前，请仔细阅读本操作手册各章节中包含的所有安全和危险信息。

1.4 允许的使用条件/操作地点

- 遵守安装Volt的轮椅的允许使用条件(参见轮椅手册)。
- 除了遵守Volt上提供的信息，还必须遵守轮椅制造商提供的信息(例如，最大爬坡能力、最大允许障碍物高度、最大用户重量、最大速度等)。
- 关于轮椅操作的任何限制(例如，最大爬坡能力、最大允许障碍物高度、最大用户体重等。)也必须遵守。
- 不要将Volt暴露在任何热源(如强烈的阳光)下，因为这可能会导致表面达到高温。
- 避免在松软的地面上使用轮椅(例如，松散的碎屑、沙子、泥浆、雪、冰或深水坑)。
- 特别要遵守第1.3条的操作说明。

- !** ①不使用时，不要将Volt长时间暴露在强烈的阳光下。这可能会导致电机发热，在极端情况下，无法以全功率运行。即使塑料部件在强烈的阳光下也会老化得更快。
- ②不要在没有防倾翻装置的情况下使用，只有在越过主要障碍物时才卸下防倾翻装置。当轮椅翻倒的危险增加时，由驾驶员判断是否呼叫护理者帮助。
- ③没有安装防倾翻装置的游乐设施会增加事故和受伤的风险。镁莱特拒绝对未使用防倾翻装置造成的事故承担任何责任。
- ④禁止取下防倾翻装置，翘起前轮，只使用两个后轮移动。镁莱特拒绝对这种驾驶方式造成的事故承担任何责任。

1.5 包装零件明细

收到产品，确认以下零件是否齐全

配件	数量
Volt	1
摇杆控制器	1
摇杆控制器支架（不同轮椅控制器支架不同，购买前请联系供应商确认适用您轮椅的支架）	1
蓄电池	1
后控制器	1
蓄电池充电器	1
本操作手册	1
魔术贴	2（适配折叠轮椅使用）

以上零件如有缺失，请联系您的专业供应商。

我们建议仅使用镁莱特提供的原装配件。

Volt的设计使其在使用镁莱特原装配件时表现最佳。镁莱特对非原装配件或备件故障导致的产品损坏或事故(如火灾)概不负责。保修不包括由非原装配件造成的损坏。因此，镁莱特将为对此类维修收费。


2. 安装

本操作手册中的信息，如“前”、“后”、“左”、“右”等。皆是轮椅使用者的第一视角的方向。


2.1 安装Volt

2.1.1 折叠轮椅安装Volt


通过松动快速锁紧螺栓将固定抱夹左和固定抱夹右拆下（如图A-1, A-2）。

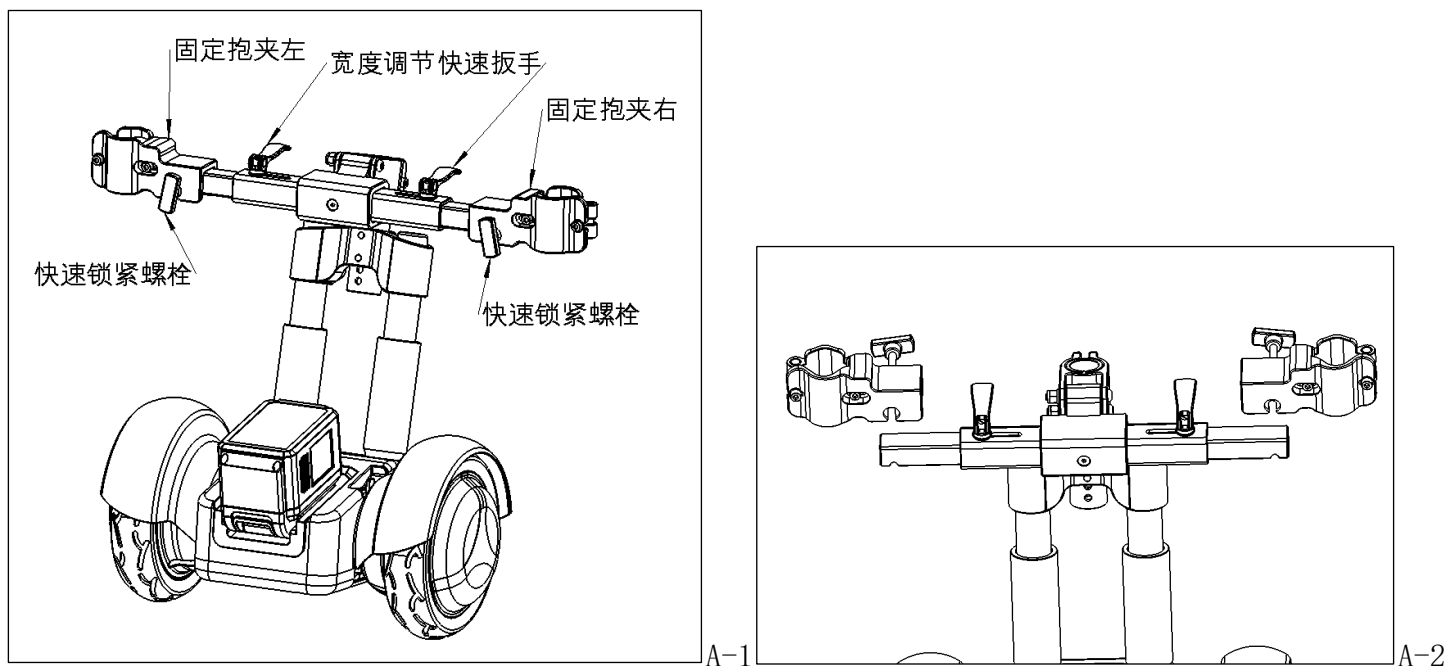


在大轮支撑竖管的上方位置粘贴魔术贴（魔术贴的作用：安装定位，保护竖管不被夹伤。如图B-1），将左右固定抱夹打开（如图B-2）。

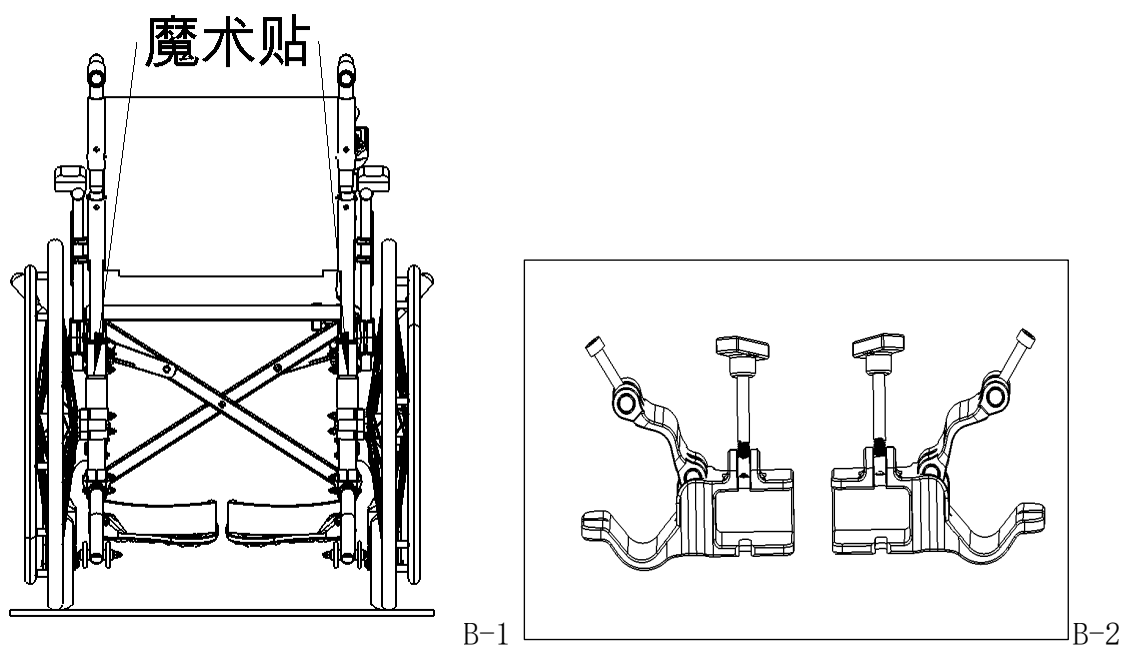

将固定抱夹组的限位螺丝打开后固定在轮椅两侧的大轮支撑竖管上（魔术贴粘贴位置），左右固定抱夹组安装高度一致（如图C-1, C-2）。

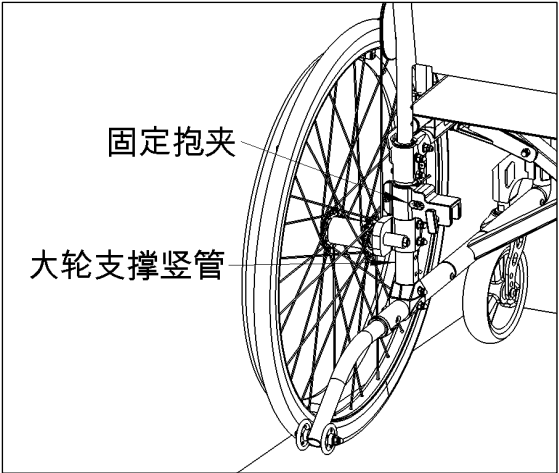

C-1

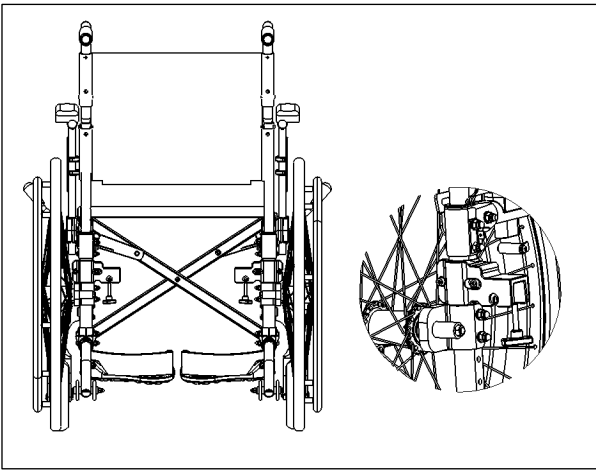


C-2


将2颗螺丝松动并将快速扳手调整为释放状态将Volt移动到固定抱夹组下方（如图D-1, D-2），使横梁组的伸缩管对准固定抱夹组的槽并卡入，锁紧固定抱夹组的限位螺栓，锁紧固定抱夹组的所有螺丝，将快速扳手调整到锁紧状态，锁紧角度调节抱件的2颗螺丝（如图D-3），完成以上步骤后轮椅大轮会离开地面（如图D-4）。




D-1

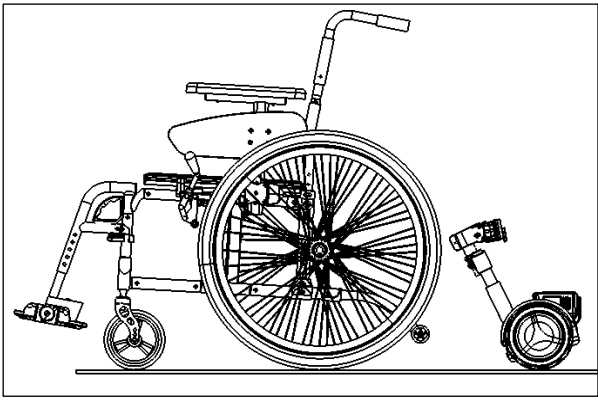

D-2

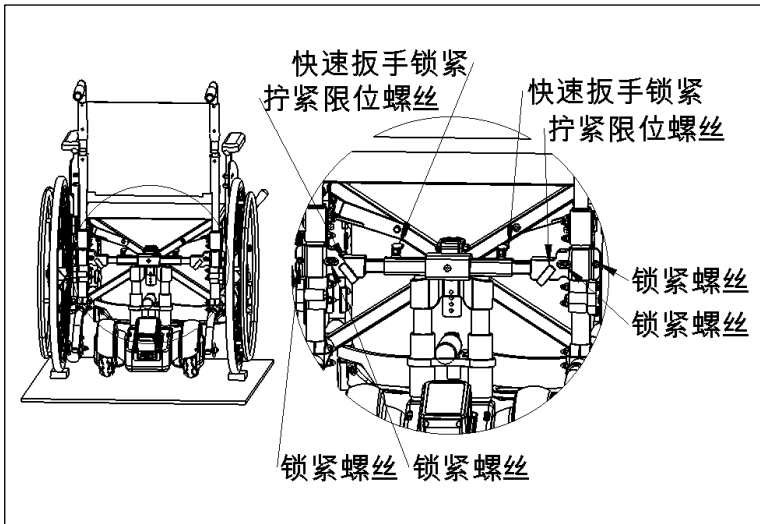


D-3

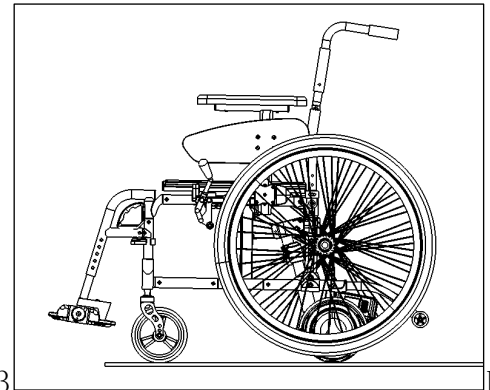


D-4

拆卸Volt方法：依次松掉固定抱夹上的快速锁紧螺栓（如图E-1），将轮椅向上抬起使得Volt主体与轮椅分离，完成Volt的拆卸，注意：Volt的固定抱夹安装在轮椅后方不会影响轮椅的正常使用无需拆卸（如图E-2），方便再次安装Volt。

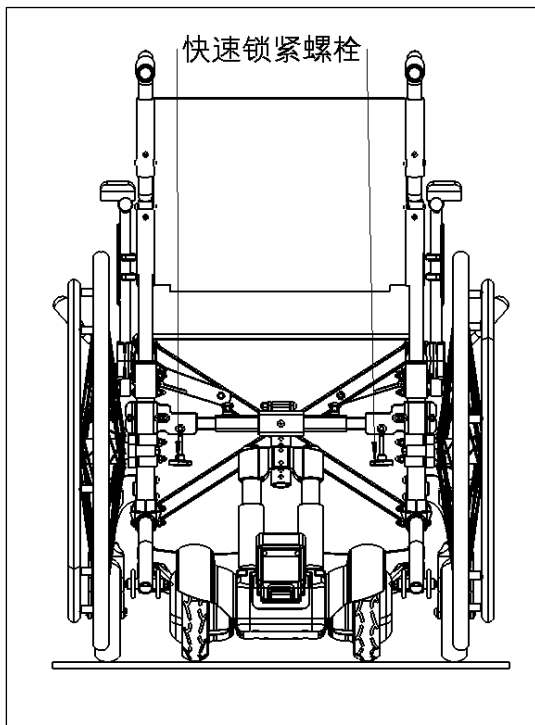


E-1

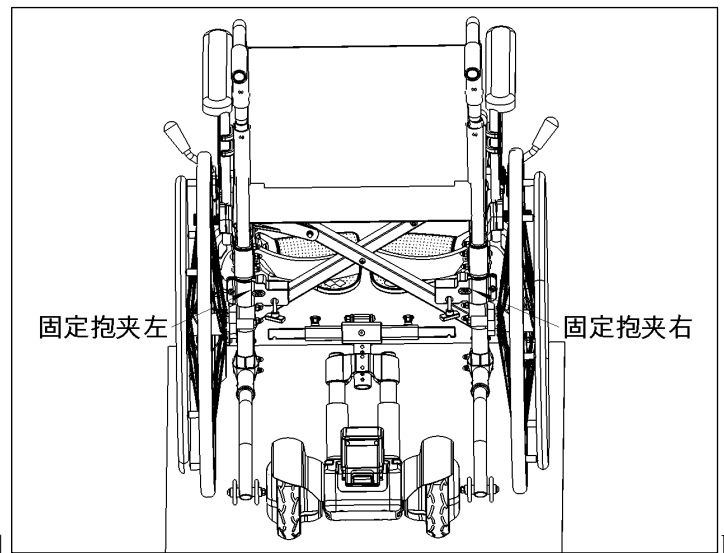


E-2

2.1.2 刚性轮椅安装Volt

将轮椅抬起以便安装固定支架（如图F-1），固定支架需要固定在轮椅下方的横梁上（如图F-2）。

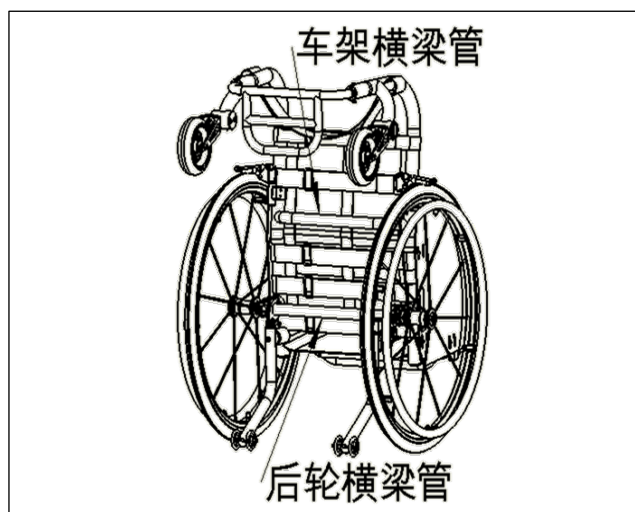


F-1

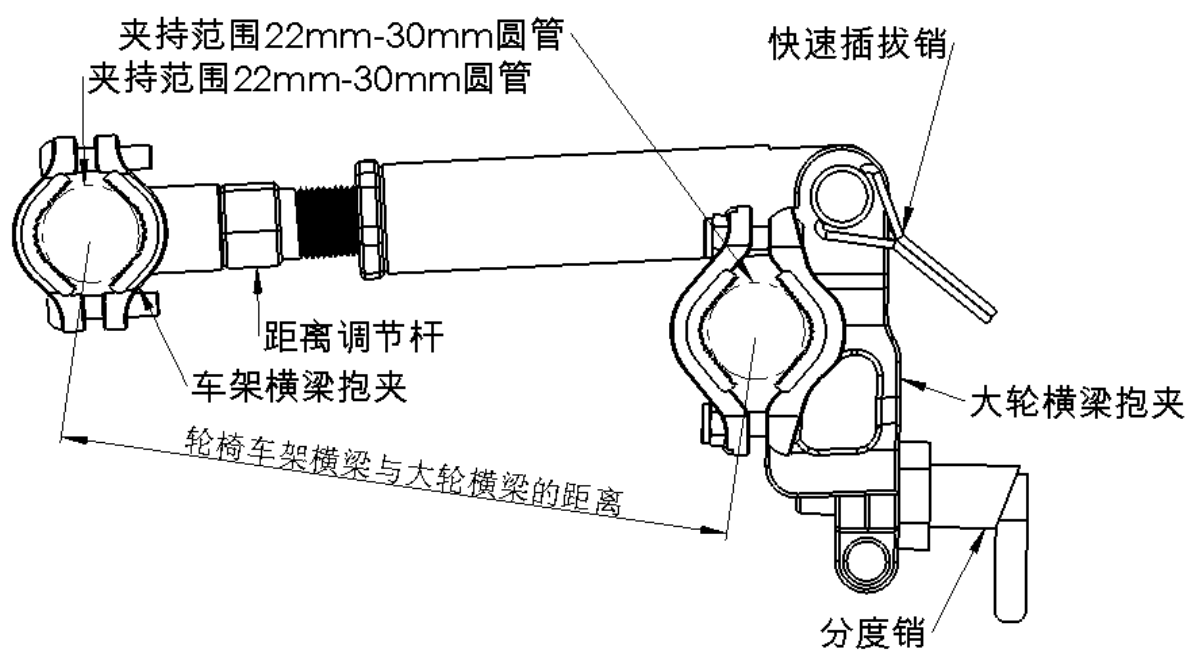


F-2


通过螺丝将车架横梁抱夹固定在车架横梁的中间位置，螺丝不要锁紧（如图G-1），拔出快速插拔销。（如图G-2）

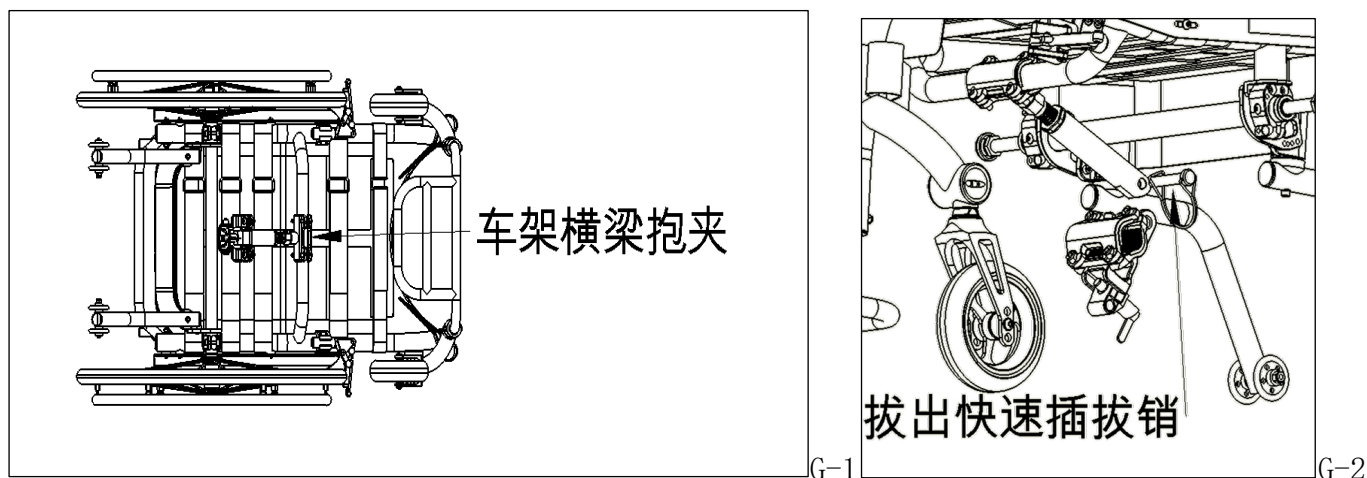



将距离调节杆转动至大轮横梁上方，将后轮横梁抱夹固定在大轮横梁中间位置，螺丝不要锁紧（如图H-1），将大轮横梁抱夹转动至与地面垂直（如图H-2）。

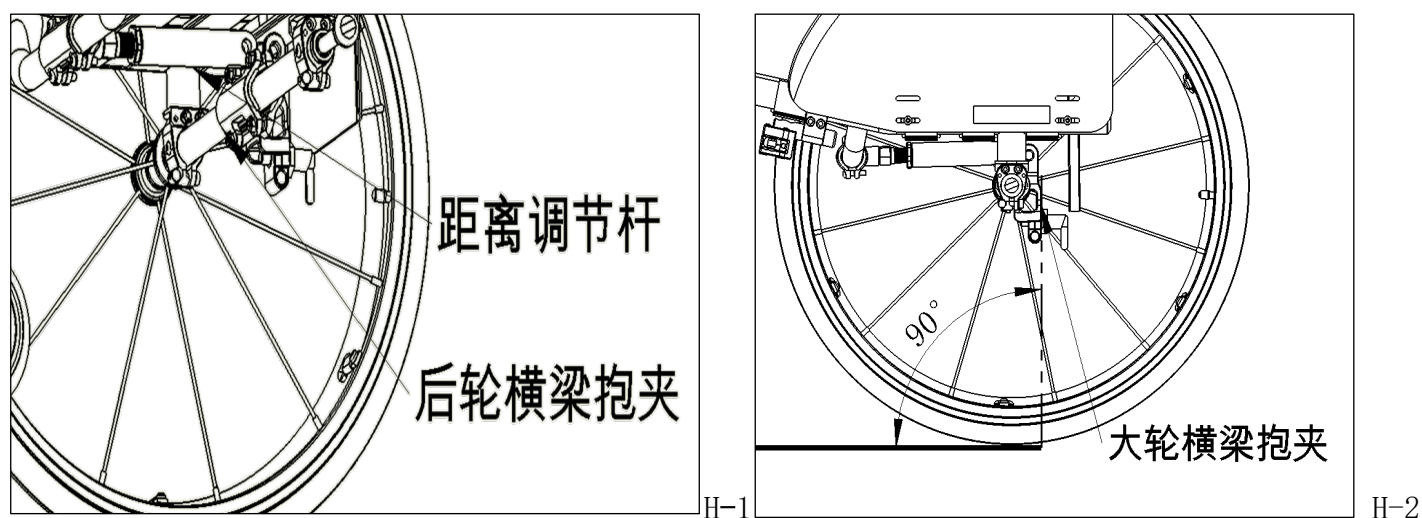


将距离调节杆与大轮横梁抱夹的安装孔对齐后，插入快速插拔销（如图I-1），最后锁紧所有螺丝。

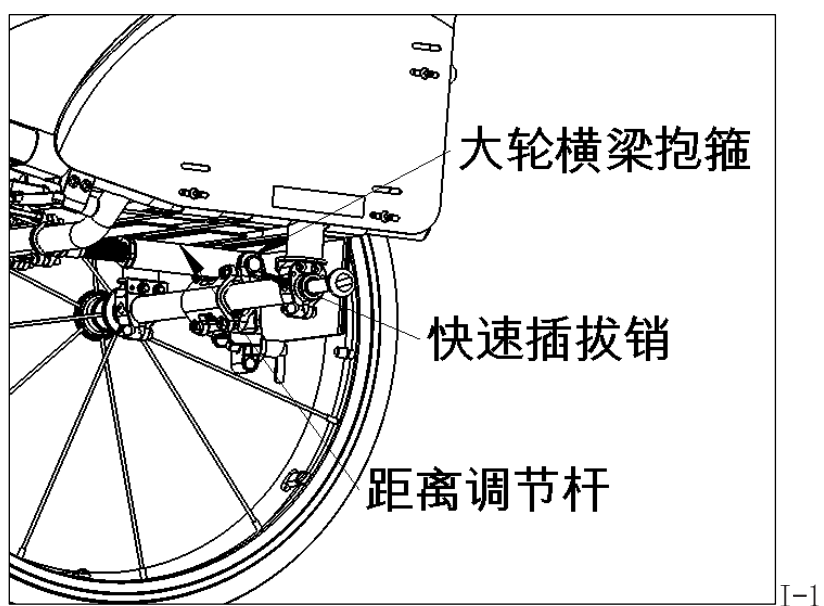

将Volt主体移动到轮椅下方居中位置，使主体连接件与大轮横梁抱夹的安装孔同心，最后插入快速插拔销（如图J-2）。

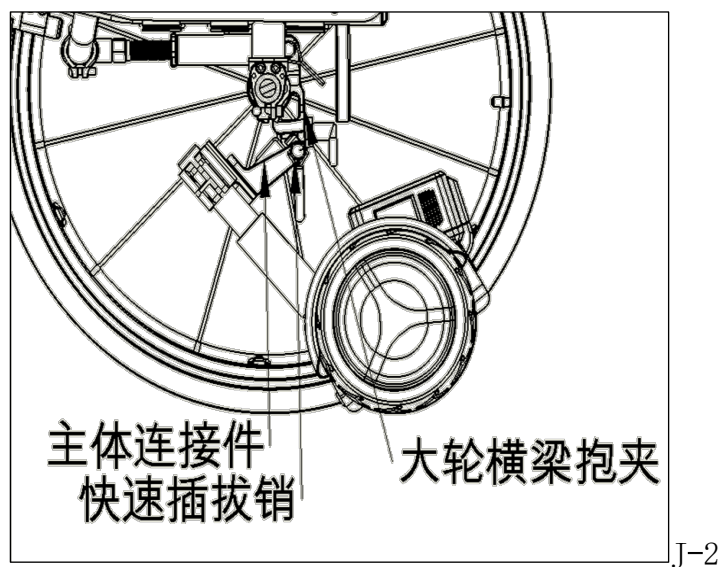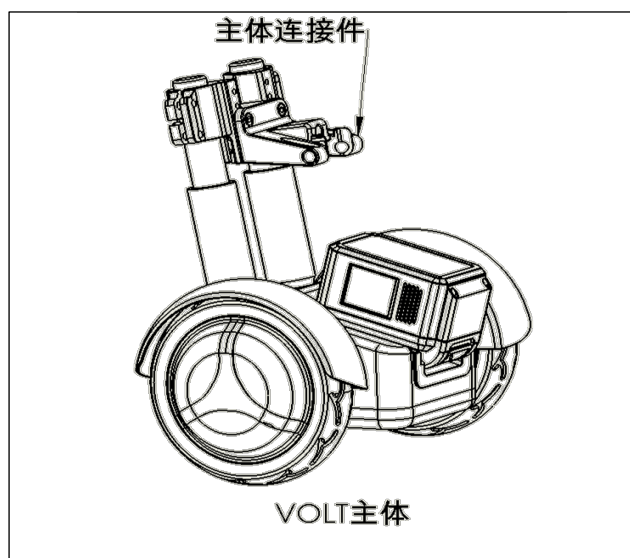


通过转动分度销手柄改变分度销状态，将大轮横梁抱夹上的分度销调整到释放状态（如图K-1）。

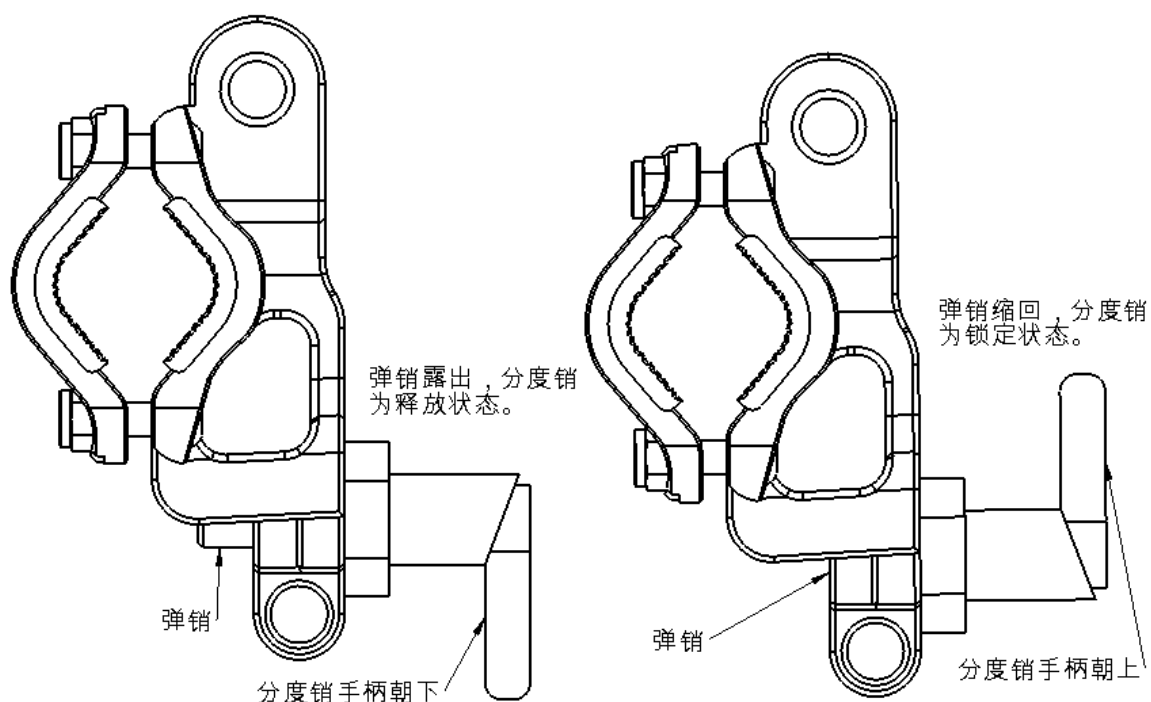


K-1

抓住靠背横梁向着尖头方向拉动轮椅（如图L-1），大轮横梁抱夹上的分度销会自动卡入主体连接件的孔内，完成以上操作后轮椅大轮会自动离开地面（如图L-2）。

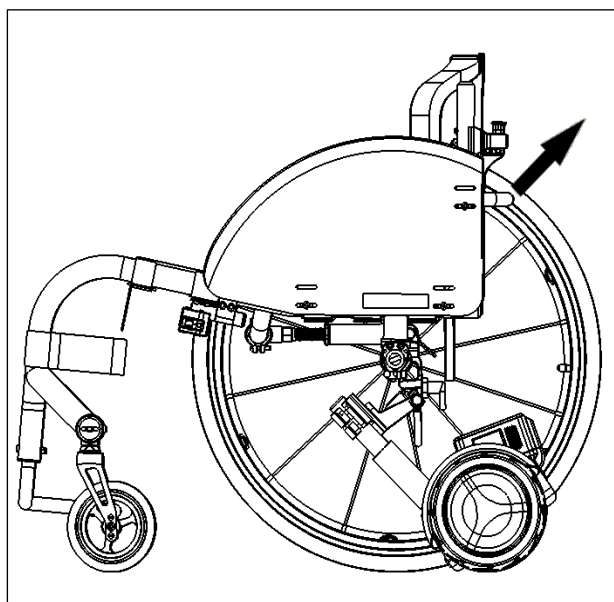


L-1

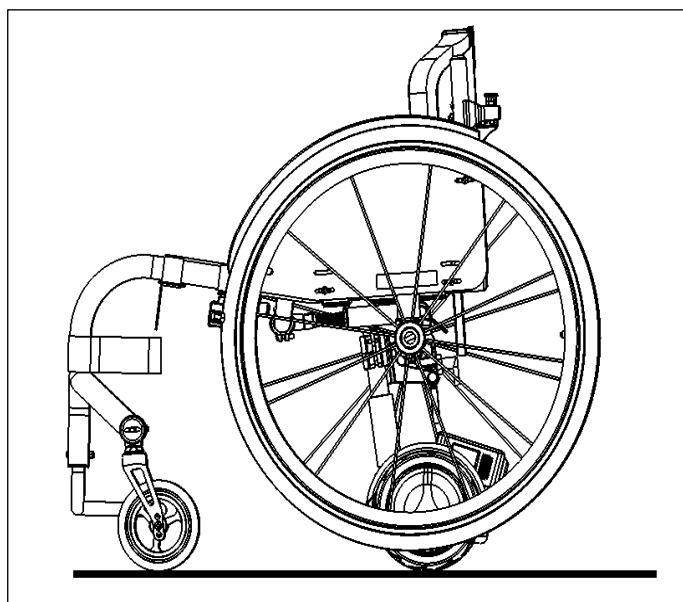


L-2

拆卸Volt方法：将大轮横梁抱夹上的分度销调整为锁定状态，抓住靠背向着尖头方向推动轮椅使大轮着地（如图M-1），拔出Volt主体与大轮横梁抱夹连接的快速插拔销即可完成Volt的拆卸（如图M-2），注意：Volt的固定支架安装在轮椅下方不会影响轮椅的正常使用无需拆卸，方便再次安装Volt。

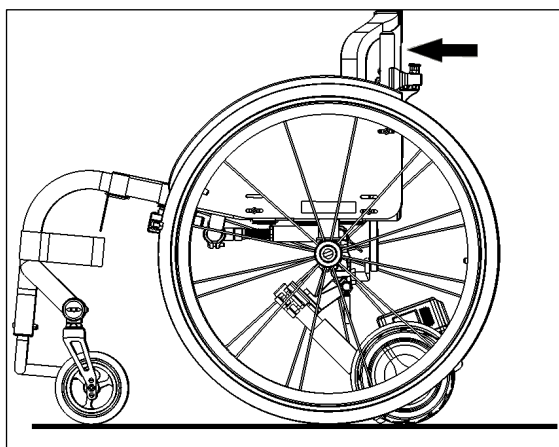

M-1

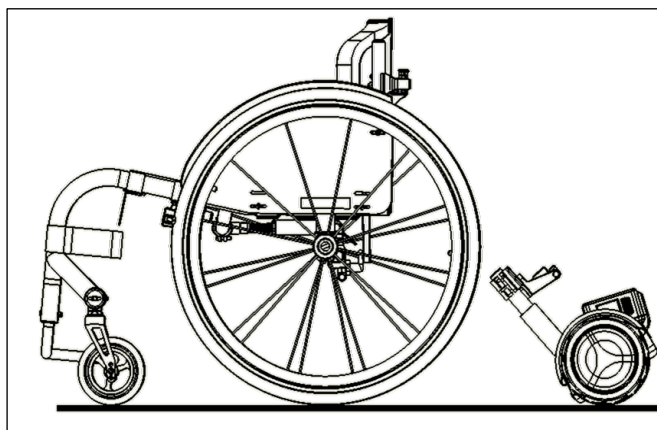


M-2


2.2 安装摇杆控制器

2.2.1 折叠轮椅安装摇杆控制器

将适配您轮椅的控制器支架安装到您的轮椅脚踏管上，取出摇杆控制器将它安装到控制器支架上（如图N-1），将摇杆控制器连接线插入Volt连接线接口，并将防松盖拧紧（如图N-2）。

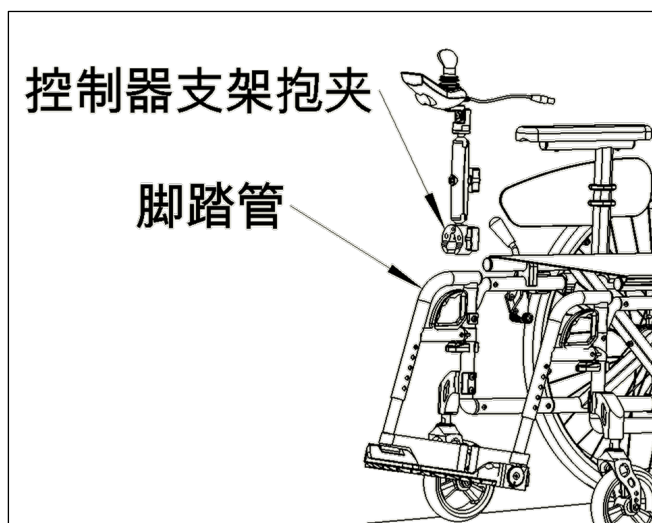



N-1

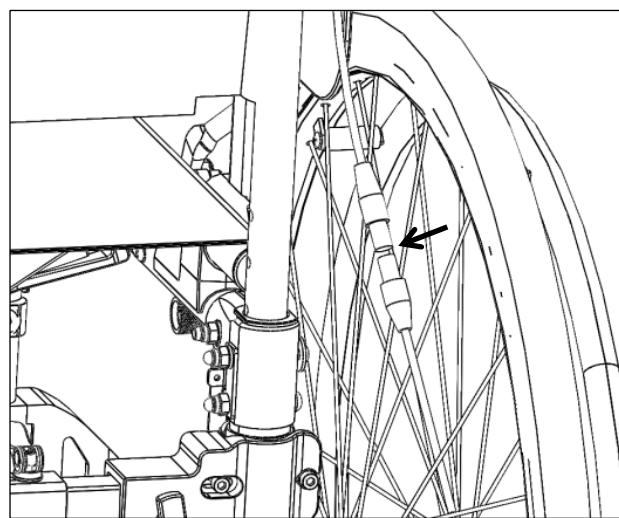

N-2

2.2.2 刚性轮椅安装控制器

将适配您轮椅的控制器支架安装到您的轮椅车架管上，取出摇杆控制器将它安装到控制器支架上（如图0-1）。将摇杆控制器连接线插入Volt连接线接口，并将防松盖拧紧（如图0-2）。

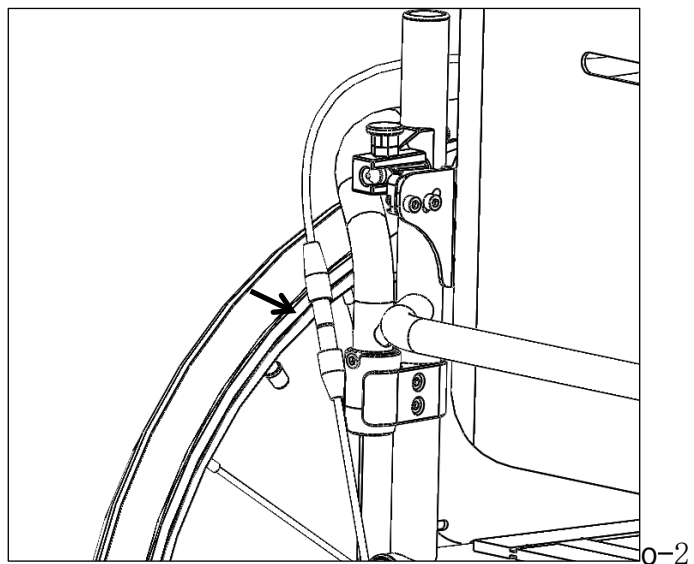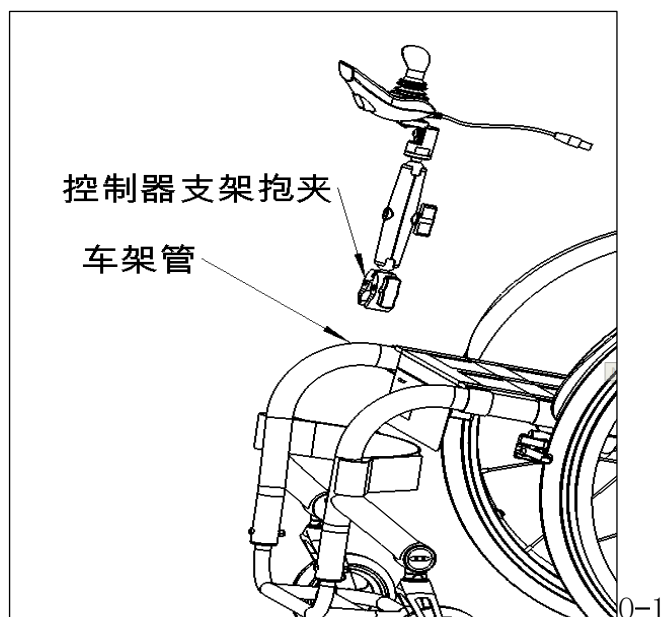


3. 使用

3.1 摇杆控制器按键及功能

如图P所示摇杆控制器各按钮


- A开关键，用以给Volt通/断电
- B喇叭键，按下内置蜂鸣器发出声响，使周围人群注意到您
- C调速键，“+”增加速度档位“-”降低速度档位
- D显示屏,显示电量及实时速度和报警故障
- E摇杆，操控轮椅前进后退
- F大灯键，按下LED灯常亮，再次按下关闭LED灯

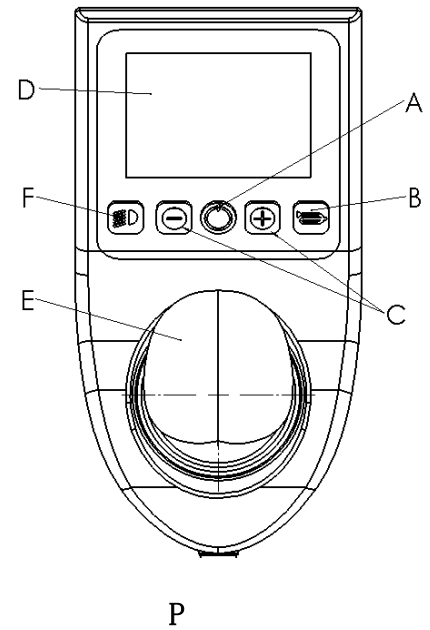

3.2 后控制器按键及功能


如图Q所示后控制器各按钮

- A开关键，用以给控制器通/断电
- B摇杆，操控轮椅行进方向和快慢程度
- C调速键，“+/-”档位增加/降低循环按键（后控的最高档位是3档，档位是从0/1/2/3/2/1/0循环）

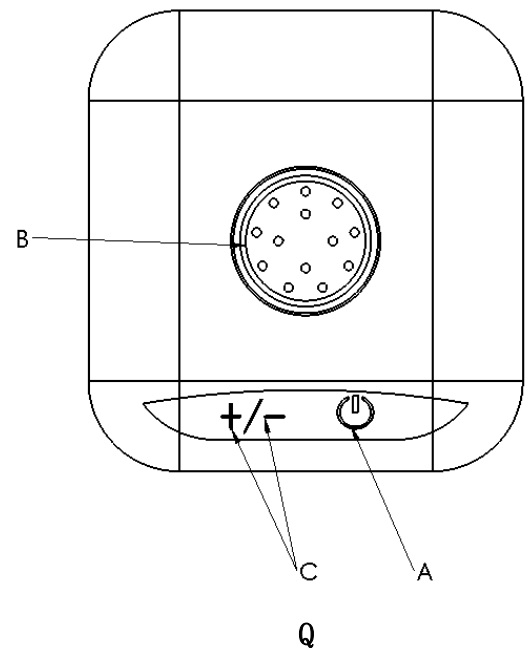

3.3 电池功能

按住锂电池尾部的按钮沿着箭头方向，可快速拆卸锂电池。（如图R）

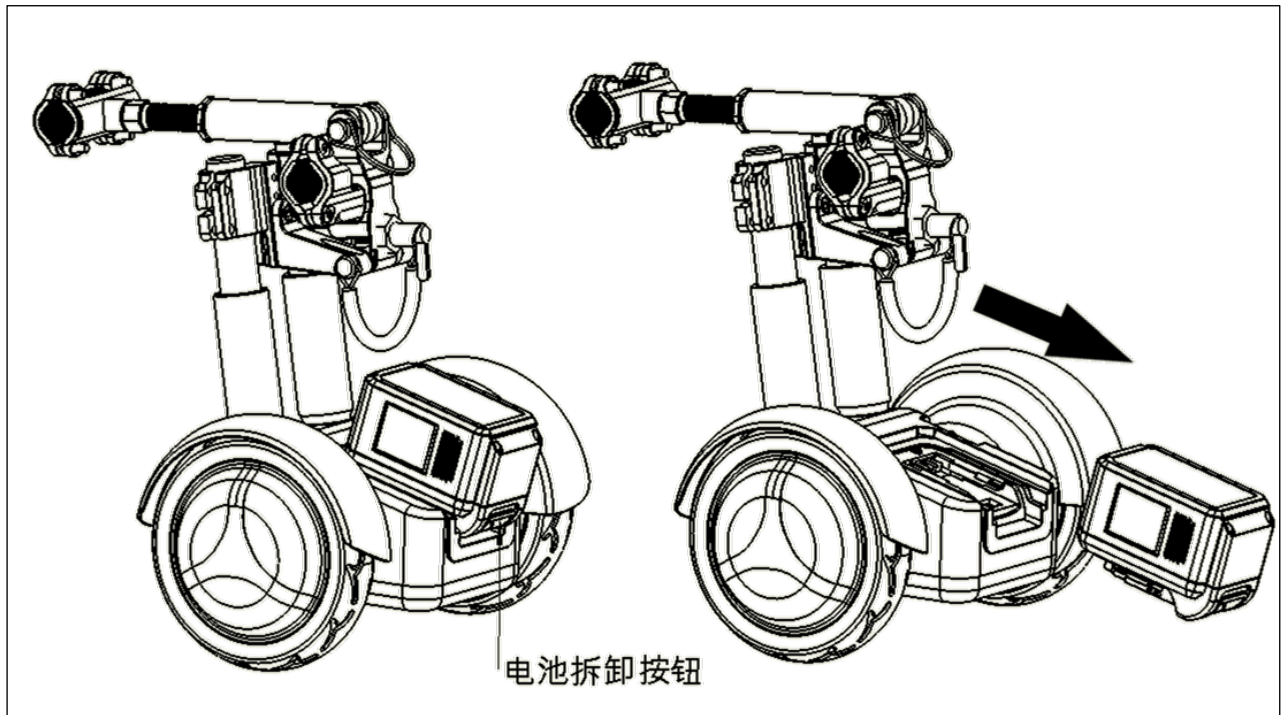

R

3.4 充电

使用前请通电查看显示屏上电量，如电量不足请及时充电再使用，Volt配置有充电器，您可取下电池连接充电器给电池充电。

- 充电完成时，充电器上的指示灯由红灯变成绿灯。
- 不要在有易燃液体或气体的地方或附近给电池组充电。
- 如果电池组过热或着火，您必须确保电池不会接触到水或其他液体。
- 请勿在潮湿可能影响电池组的房间内进行充电。
- 轮椅在至少两倍于其容积的空间内进行充电，有足够的通风，不会因可燃气体的积聚而产生危险。
- 充电时让轮椅和电池充电器远离火源，如火焰和火花。
- 切勿在低于0°C或高于40°C的温度下给电池组充电。如果您试图在此温度范围之外进行充电，造成的后果镁莱特概不负责。
- 充电完成后，请及时拔下充电器。

4. 安全说明及注意事项

4.1 安全说明

第一次使用时，请认真阅读以下使用说明：

- 使用者的安全与健康是重中之重。因此在使用前，您必须全面的了解Volt。
- 第一次使用时，您必须确保身边有护理人员陪同。
- 在您完全掌握安全操作Volt之前，切勿驾驶轮椅到公共道路上，这可能对您和他人造成伤害。
- 不使用轮椅时，请断电，并确保轮椅上的刹车可以有效的制动轮毂，这可以防止轮椅无意中滚动。
- 在将Volt安装到轮椅上或拆下之前，控制器必须关闭。
- Volt只能安装在镁莱特批准用于该设备的手动轮椅。
- 使用Volt时，请遵守轮椅制造商的安全说明。
- 第一次使用时，请在平地上使用。
- 在没有障碍物的地方进行使用训练。
- 始终根据外部条件调整您的速度，例如，绕过任何突然出现的障碍物或停下您的轮椅。
- 起步时，切勿立即将操纵杆推到最大位置。这可能导致轮椅不受控制地移动(事故风险)。
- 当松开操纵杆时，你的轮椅会轻轻地刹车。如果您需要突然刹车(立即停止)，则向行驶方向的相反方向短按操纵杆，然后松开。
- 当Volt开启时，切勿将手伸入车轮。
- 在使用Volt上坡或下坡之前，请在水平地面上练习操作该设备。
- 上坡时请判断电量是否足够爬过斜坡，没有足够电量时请勿尝试上坡，以免上坡时突然断电造成轮椅溜坡。
- 在任何斜坡上使用都要格外小心，上坡时请放慢速度，请勿在上坡时快速冲过，防止轮椅车翘头倾倒。
- 不得超过轮椅制造商规定的最大允许坡度。
- 下坡时降低您的速度，以避免任何突然出现的障碍物或轮椅突然停止导致使用者飞出轮椅。
- 请注意，下坡行驶时，Volt的制动路径可能比地面上的制动路径长得多，这取决于速度和坡度。因此，相应地调整您的速度。
- 如果您打算在上坡或下坡时坐在轮椅上停车，必须启动手动刹车。
- 不要在行驶时突然使用手动刹车。
- 不要穿越陡峭的山坡或类似的地形。颠簸的路面可能会导致轮椅向一侧翻倒。
- 行驶时，不要突然以最大速度向左或向右改变行驶方向，因为这可能导致轮椅向一侧倾斜。
- 定期检查抱夹是否锁紧，防止使用时抱夹突然脱落，造成翻车。
- 定期检查后轮胎压。
- 每次使用前，检查Volt车轮胎。如果轮胎已经达到磨损极限，则不得使用Volt。
- 如果地面潮湿，轮胎抓地力可能会很差，因此有打滑的危险。相应地调整您的驾驶行为，切勿驾驶磨损的轮胎。
- 不要在没有防倾翻装置的情况下使用，只有在越过障碍时才需要卸下防倾翻装置。当轮椅翻倒的危险增加时，由使用者判断是否呼叫护理人员帮助。
- 避免在松软的地面上使用轮椅(例如，松散的碎屑、沙子、泥浆、雪、冰或深水坑)。
- 在公路上使用时，你必须遵守道路交通规则。
- Volt仅用于运送行动不便的人员，不得被误用，例如让儿童玩耍或运送货物。
- 避免在强磁场附近操作Volt。
- 避免在恶劣条件下使用Volt出行，例如在暴风雨、冰雹等天气。
- 切勿在流水下清洗部件，例如，使用软管或高压清洗机。这会导致进水，对电子设备造成不可修复的损坏。
- 镁莱特对设备内部进水造成的损坏不承担责任。请注意，这种损坏不在我们的保修范围内。
- 切勿在操作杆上悬挂任何物品（例如钥匙），这可能会造成操作杆回不到初始位置，造成轮椅停不下来。
- 使用时，切勿穿带宽松的上衣、裤子和裙子，避免衣物被车轮卷入，对使用者造成伤害。
- 不要在照明条件不佳的情况下使用，光线不佳时，路上的汽车驾驶员难以观察到您，可能会对使用者造成伤害。

4.2 电池充电安全说明

给电池充电之前，请阅读并遵守以下安全说明和注意事项

不遵守安全预防措施和说明可能会损坏产品或导致触电、火灾和/或严重伤害。电池组含有化学物质，如果忽略以下的安全说明，可能会导致危险反应。镁莱特对不遵守安全说明造成的损坏不承担责任。

- 开始充电前，请关闭系统。
- 只能使用Volt附带的充电器给电池充电。
- 除了我们提供的充电器，不要使用其他任何充电器。
- 不要用充电器给任何其他电池充电。
- 在充电过程中，不要将充电器暴露在任何湿气中(水、雨水、雪等)。
- 注意冷凝，如果将充电器从寒冷的地方带到温暖的房间，设备上和设备内部可能会出现冷凝。在这种情况下，请不要使用充电器，直到所有凝露都消散。请注意，这可能需要几个小时。
- 请勿在潮湿可能影响充电器的房间内进行充电。
- 切勿用力拉电源线来断开充电器与电源插座的连接。
- 充电时确保不会有其他人被充电线绊倒。
- 如果电源线、充电线或插头损坏，请勿使用充电器。请与您的经销商联系更换充电器。
- 如果充电器受到重击、掉落或以其他方式损坏，请勿使用或拆卸。将损坏的充电器送到镁莱特授权的专业经销商处进行维修。
- 儿童不得使用充电器。
- 充电器设计为仅在180 V至240 V的交流电源电压下工作。
- 切勿试图拆卸或改装充电器。
- 在充电过程中，不要盖住充电器或将任何物体放在设备顶部。
- 切勿让充电线和插头承受任何压力。过度拉伸、弯曲充电线或将重物放在充电线或插上可能会导致触电或火灾。
- 切勿将充电电线的两端连接到任何金属物体上。
- 确保插头牢固地插入插座。
- 不要用湿手触摸电源插头或充电电线插头。
- 如果充电器插头或电源插头是湿的或脏的，请勿使用。插入插头前，用干布清洁插头。
- 一旦充电过程完成，首先从插座上断开充电器的插头，然后从电池上断开充电插头。
- 首次使用Volt前，电池应充满电。
- 切勿在低于0°C或高于40°C的温度下给电池充电。
- 电池不得暴露在高温(如散热器)或火中。外部热暴露会导致电池组爆炸。
- 在电池过热或着火(不太可能)的情况下，您必须确保电池组不会接触到水或其他液体。电池制造商推荐的唯一合适的灭火剂是沙子。
- 如果可能，请在每次使用后给电池充满电。
- 不得打开或拆开电池外壳。不当打开或故意破坏会带来严重伤害的危险。此外，打开电池会导致保修索赔无效。
- 切勿将电池插座连接到金属物体上，或确保触点不会接触到金属物体(例如金属屑)。
- 切勿将电池浸入水中。
- 如果损坏或有缺陷，必须检查电池，请联系您的专业经销商。
- 如果电池组有缺陷或损坏，不得使用Volt。请联系您的专业经销商进行维修。
- 务必保持电池清洁干燥。

5. 储存、清洁、循环使用和处理

5.1 储存

如果您的轮椅和Volt将长期存放(例如几个月)，请遵守以下规定：

- 根据轮椅制造商的规范储存轮椅。
- 用薄膜保护Volt组件，以防受潮。
- 将轮椅和所有Volt组件存放在干燥的房间内。确保没有湿气渗入或滴到轮椅或Volt组件上。
- 确保轮椅和Volt不会持续暴露在太阳辐射下(例如通过窗户)。
- 确保未经授权的人员(尤其是儿童)无法在无人监督的情况下进入该房间。
- 电池的使用寿命部分取决于其存放位置。因此，不要将电池或Volt长时间放置在高温位置。特别是停放在阳光下的汽车后备箱。汽车后备箱仅用于运输，而不是存放。
- 将电池和Volt存放在阴凉干燥的地方避免损坏。
- 为获得最佳使用寿命，请将电池储存在温度为18°C至23°C、湿度为0至80%的环境中。
- 在这种条件下，电池的保修期为1年。
- 在储存期间，不要将电池暴露在任何类型的湿气中(水、雨水、雪等)。
- 在储存之前，请为电池充电，并每月检查其电量状态。如果电量下降到50%以下，必要时给电池充电。

5.2 清洁

清洁Volt必须确保没有液体或湿气接触，请特别遵守以下说明：

- 用干布或微湿的布清洁车轮表面。
- 切勿使用百洁布、研磨性清洁剂或腐蚀性化学品来清洁组件。
- 切勿在流水下清洗部件，例如，使用软管或高压清洗机。这会导致进水，对电子设备造成不可修复的损坏。

镁莱特对设备内部进水造成的损坏不承担责任。请注意，这种损坏不在我们的保修范围内。

5.3 循环使用

本产品适合循环使用，类似于二手汽车，提高产品利用率，但使用时注意本产品只适用于镁莱特批准安装的轮椅型号上。为保证其他用户的安全，不可改变轮椅的配件及功能。

5.4 处理

如果您需要报废本设备，因为电池内含有对环境有害的物质，您不可将本设备随意丢弃到垃圾桶内，您需了解当地的法律，合理的回收此设备。

6. 技术参数

Volt	
额定功率	2x200W
工作电压	20V DC
速度范围	0.5-4.5KM/H
最大爬坡角度	负载100KG，爬坡6°
行驶里程	负载100KG，续航15KM
工作温度	-20° C - +50° C
最大载重	100KG
电池	
电池类型	锂离子电池
标称容量	6Ah
标称电压	20V
防水等级	IPx4
重量	0.95kg
充电温度	0°C-40°C

7. 维护及保修

7.1 维护

根据我们的市场观察，在正常操作条件下使用时，每隔两年需要对我们的产品进行维修和检查。两年的时间间隔可能会根据产品的实际使用而变化，用户需根据实际使用情况调整维护时间。

7.2 保修

镁莱特为您的Volt提供24个月的耐久性保修。耐久性保修不包括：

- 序列号被篡改或移除的设备。
- 磨损零件如轮胎。
- 由正常磨损、不正确操作(包括不遵守本操作手册中的说明)、事故、人为损坏、火灾、水、不可抗力和无法控制的其他事件造成的损坏。
- 没有检测到故障或缺陷的设备。

保修期限起点为购买日期

注意电池在遵守本手册中的安全使用说明及储存条件下提供12个月保修。

用户须持保修卡和发票对Volt售后保修。

超过保修期或不正确操作造成的维修，需收取配件及人工费用。

保修卡

用户信息	姓名		手机号码	
	地址			
产品信息	产品项目		产品系列号	
	购买日期		购买凭证编号	
经销商信息	经销商信息		经销商邮票	
	手机号码			
维修记录				
维修日期	负责人	维修记录		

【标签、包装、标识设计】

标志	说明	标志	说明
	欧盟认证标志		欧盟地区的授权代表
	制造商名称地址		生产日期
	批次码		请存放在清洁、干燥且防雨、防雪、防冰、防盐及防水的地方。
	警告和注意事项		未经灭菌的
	医疗器械		保质期
	保持干燥		避免阳光直射
	请查阅使用说明		唯一设备标识符
	生产制造国		产品型号
	进口商		经销商

制造商信息

名称: 镁莱特（上海）科技有限公司
地址: 上海市松江区九亭镇沧泾路200号3幢101-1室
电话: +86-021-57898620
传真: 0086 21 55036385
邮箱: info@lichtmega.com
网站: <https://lichtmega.com/>